

novinky 2021 way





Way

2020



way Milano



way Mix

way Extra

Jednotný
typ spoje!

way Roma



way Rock

way Short





way Slim



way Venezia

Do vyprodání
zásob


2021

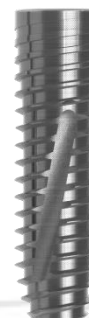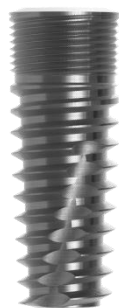



way | miX



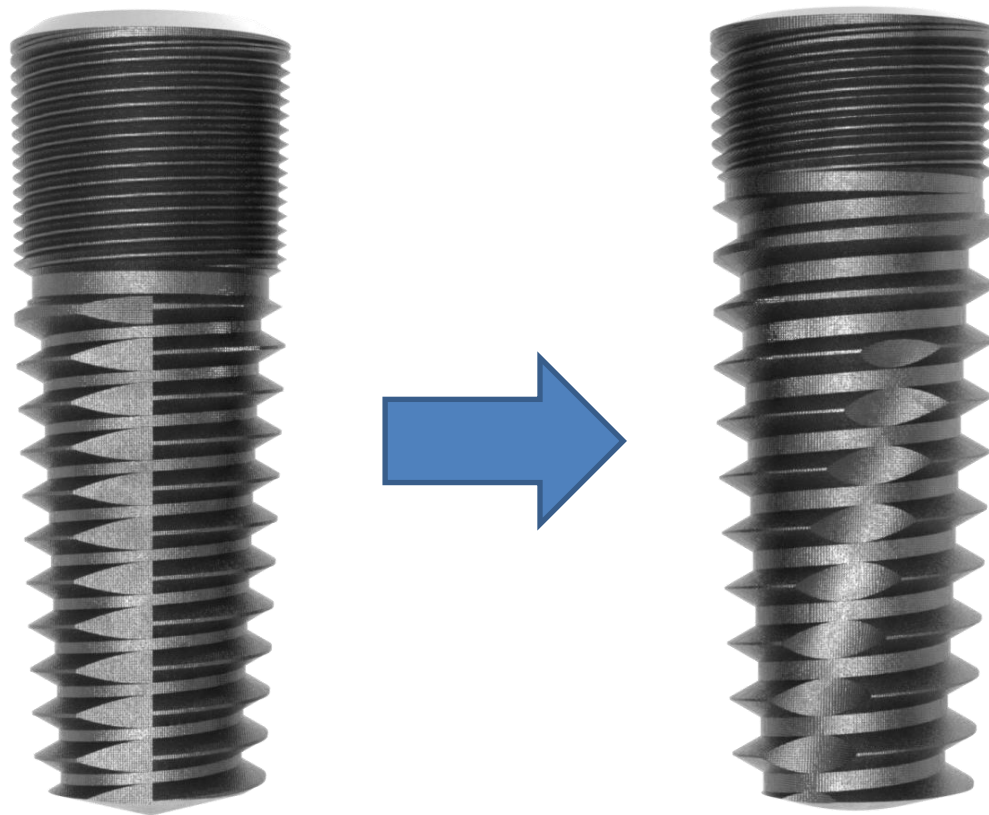


way| milano


way| miX



Microzávit

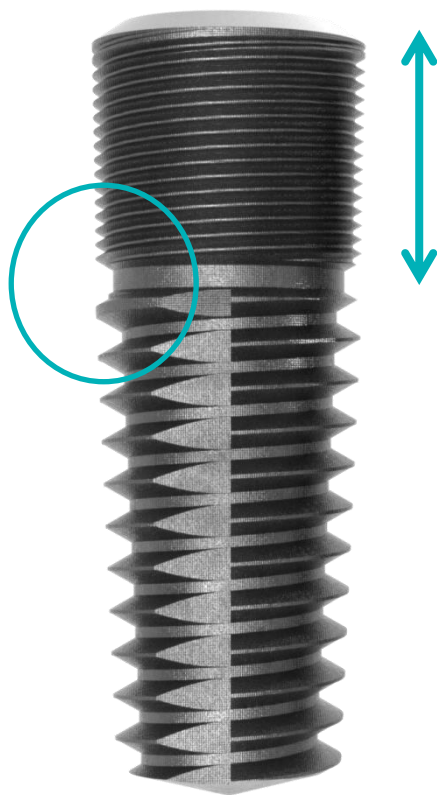



way|milano

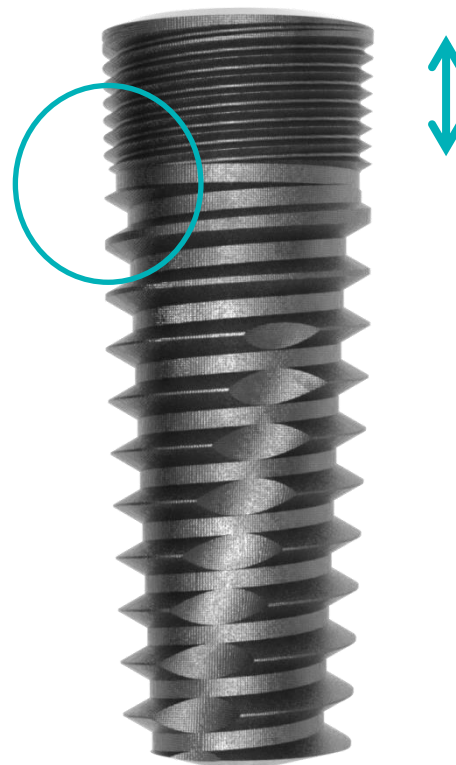



way|miX



Závit

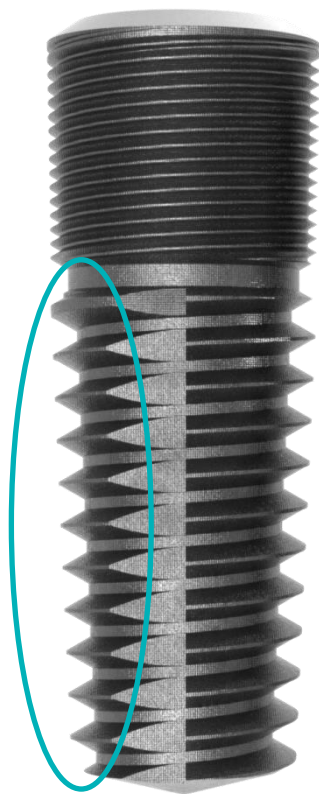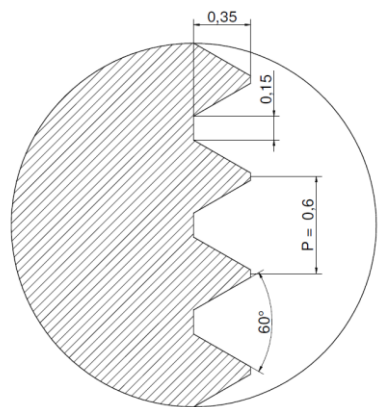


way|milano

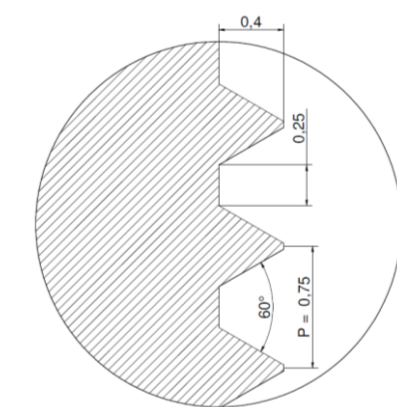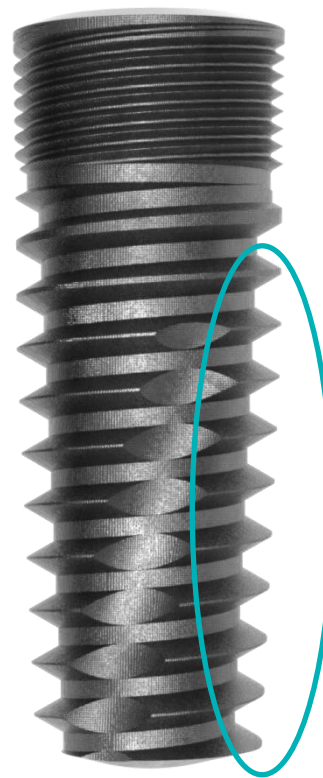


way|miX

Samořezná drážka

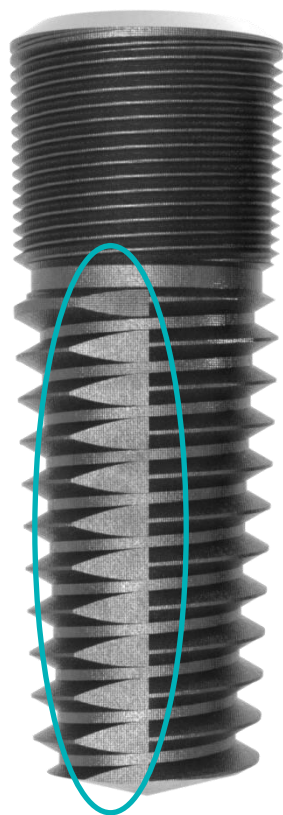

way|milano

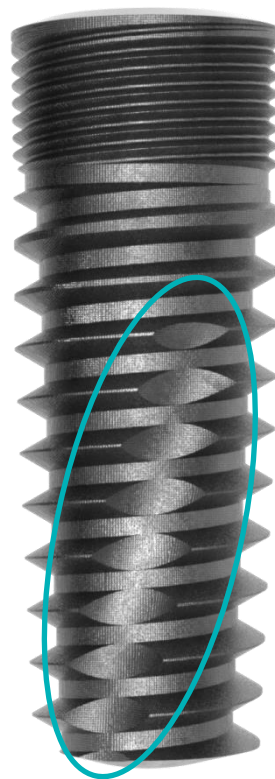

way|miX



Zaoblená špička




way|milano



way|miX



Jednotný typ spoje

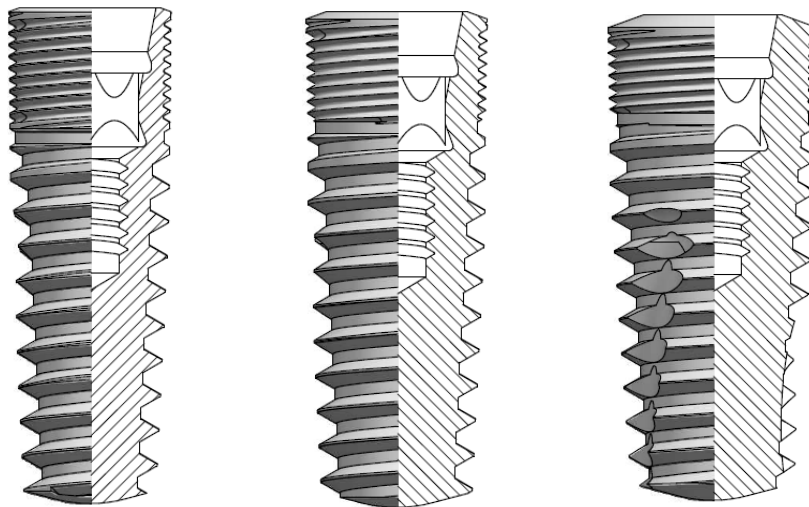

• Pro všechny průměry **3,4 / 3,8 / 4,5** je k dispozici **jednotný typ spoje** odpovídající
aktuálnímu průměru 3,4 / 3,8


• **Zavaděče a protetické komponenty používáte stejné jako pro průměr 3,4/3,8**

Poznámka: spoj **Way Extra** ø 4,5 bude také sjednocen



way Mix: implantáty

Jednotný typ spoje

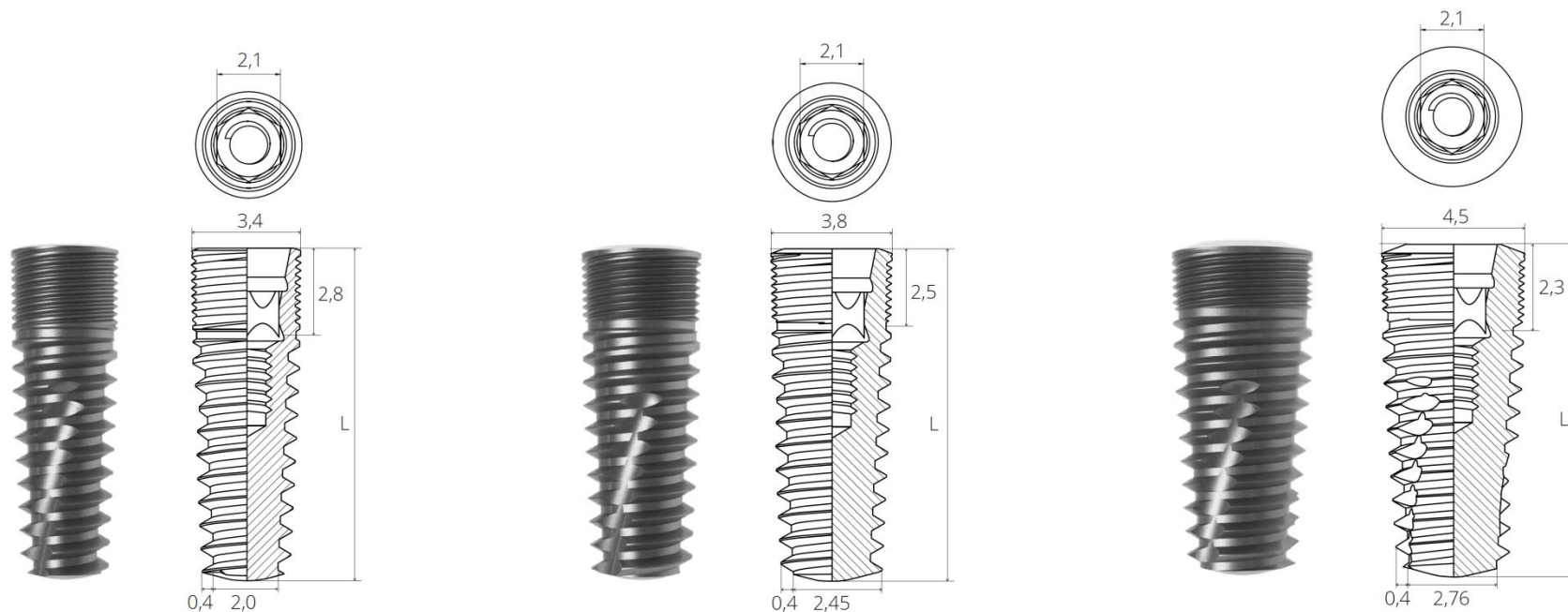

Pro všechny průměry je k dispozici **jednotný typ spoje** odpovídající aktuálnímu průměru 3,4 / 3,8



way Mix



diameters		lengths						
3.4			9	10	11	12	13	15
3.8	6,5	8	9	10	11	12	13	15
4.5	6,5	8	9	10	11	12	13	15

way Mix: *úzký* a *široký* profil protetických komponentů

- Jednotný typ spoje
- Dva profily: *úzký* a *široký*



comparison
between
two profiles



ÚZKÝ

- odpovídá současným
komponentům 3,4 / 3,8
- žlutá barva



ŠIROKÝ

- nové komponenty
- žádné zbarvení



way Mix: *úzký* a *široký* profil protetických komponentů

way|miX



ø 3,4



ø 3,8



ø 4,5

way|extra



ø 3,4



ø 3,8



ø 4,5

Protetické komponenty




úzký



široký


Pro všechny průměry je k dispozici **jednotný typ spoje** odpovídající
aktuálnímu průměru 3,4 / 3,8.

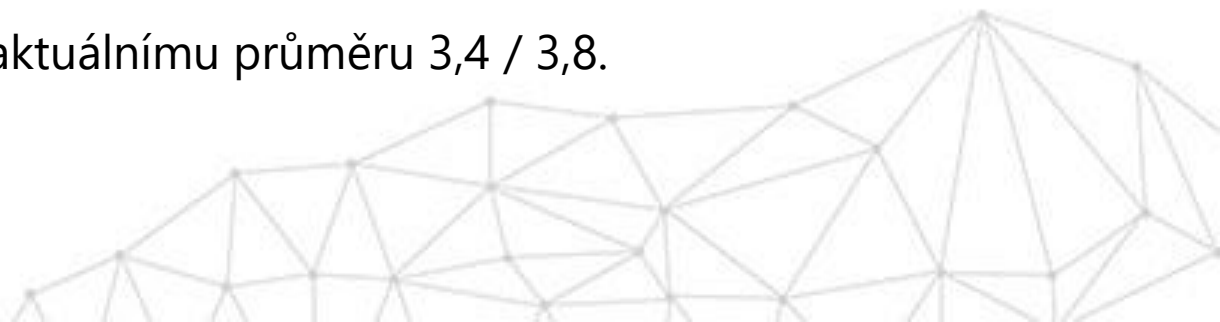

way Extra


- **Jednotný typ spoje:**
 - ⇒ $\varnothing 3,4$ a $\varnothing 3,8$: beze změny
 - ⇒ **$\varnothing 4,5$: externě identické, ale odlišný typ spoje**

Starý implantát $\varnothing 4,5$

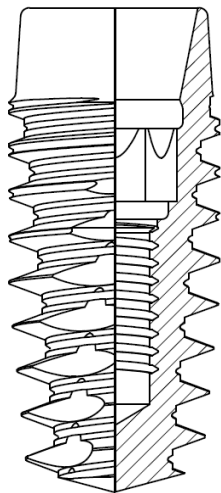

odlišný spoj


Nový implantát $\varnothing 4,5$

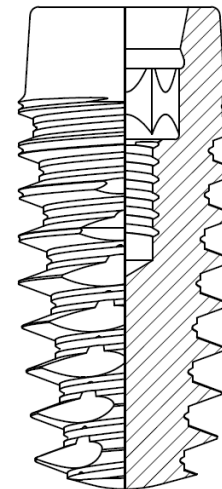

Jednotný typ spoje,
stejný jako $\varnothing 3,4/3,8$ mm


way Extra

Starý typ
implantátu ø4,5

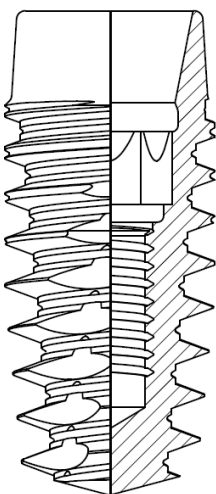

odlišný
spoj

Nový typ
implantátu ø4,5

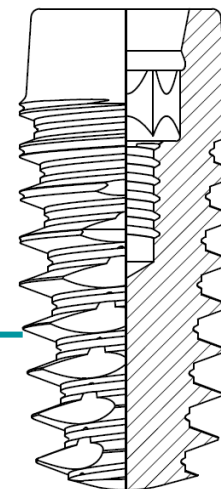

Jednotný typ spoje,
stejný jako ø 3,4/3,8 mm




way Mix: nové protetické komponenty

- Vhojovací váleček H3




- Šroub otiskovací kapky s retencí: pro snazší odšroubování


Poznámka: nyní k dispozici pro way Mix; u ostatních typů do vyčerpání zásob

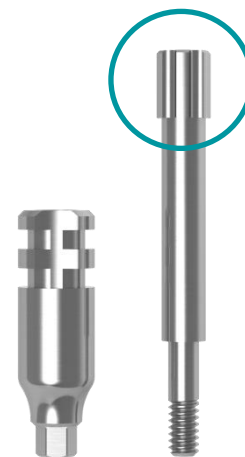

- Přesnější otiskování:
 - byla odstraněna drážka na konci šestiúhelníku
 - bylo odstraněno zkosení na špičce

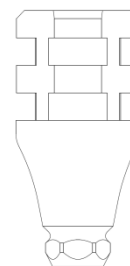

dříve

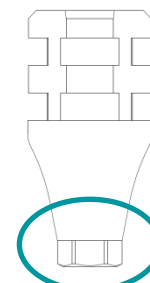

nyní

way Mix: nové protetické komponenty

▪ Fusion CoCr abutment

- řešení pro odlévání
- H 1 a 3 mm
- rotační a antirotační varianta




▪ Custom předfrézovaný abutment

- Vyvinuto dle požadavku Dr Scipioni
- V určitých případech jej lze použít i jako otiskovací kapnu.





way

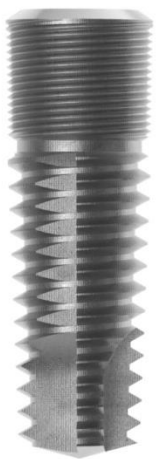

way Milano



way Roma

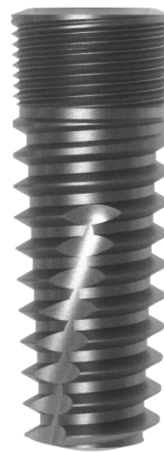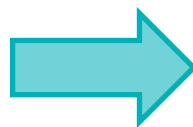



way Mix



way Rock



Way Rock

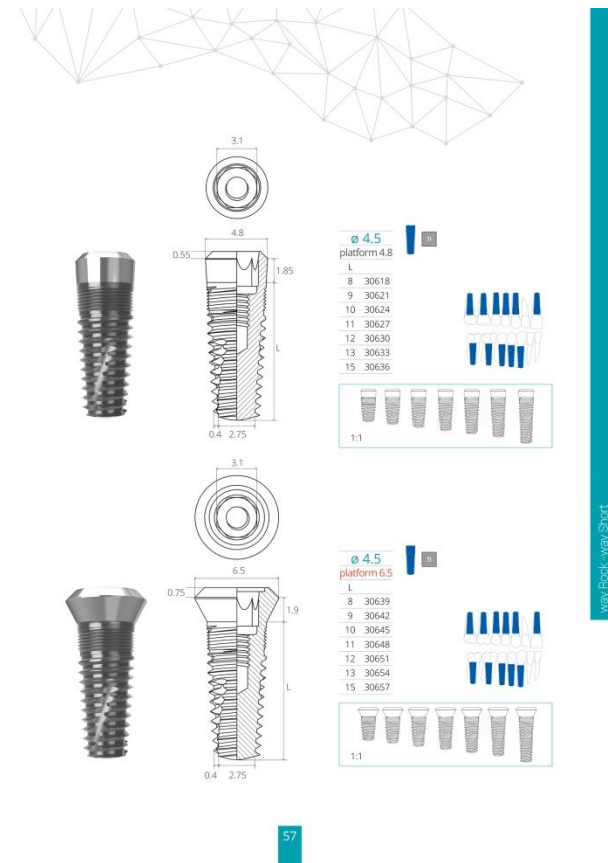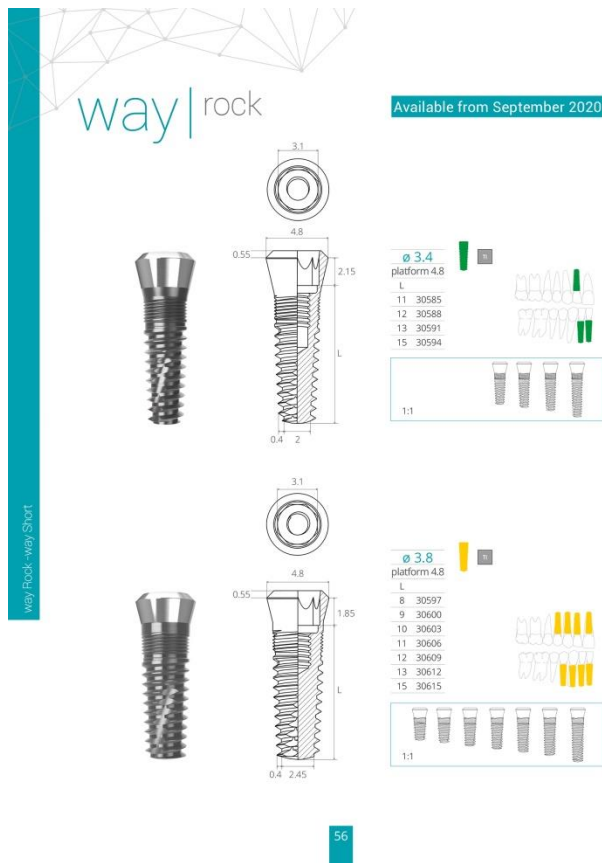

Ostatní novinky - way



Ostatní novinky - way

- Way Slim: nová délka 9 mm



9



11





13



15




Kopinatý vrták

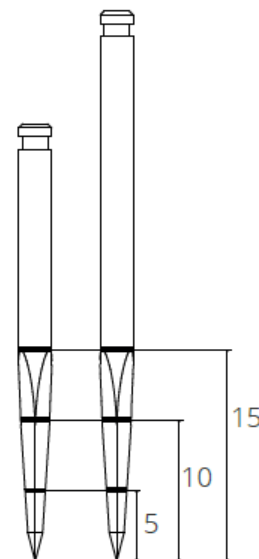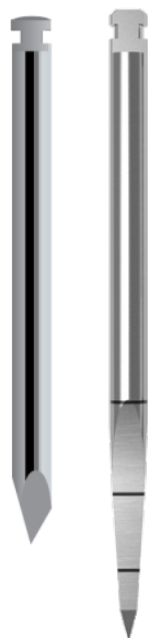


- Slouží k perforaci kortikalis při zahájení preparace štoly. Lze jej přesně a stabilně centrovat na vrcholu alveolu.
- Nezavádějte tento vrták do úrovně definitivní hloubky budoucí štoly pro implantát; referenční značky slouží ke kontrole hloubky preparace – tímto vrtákem smíte preparovat o 2 mm méně hluboko než je délka vybraného implantátu.

Nové spirálové vrtáky a zarážky

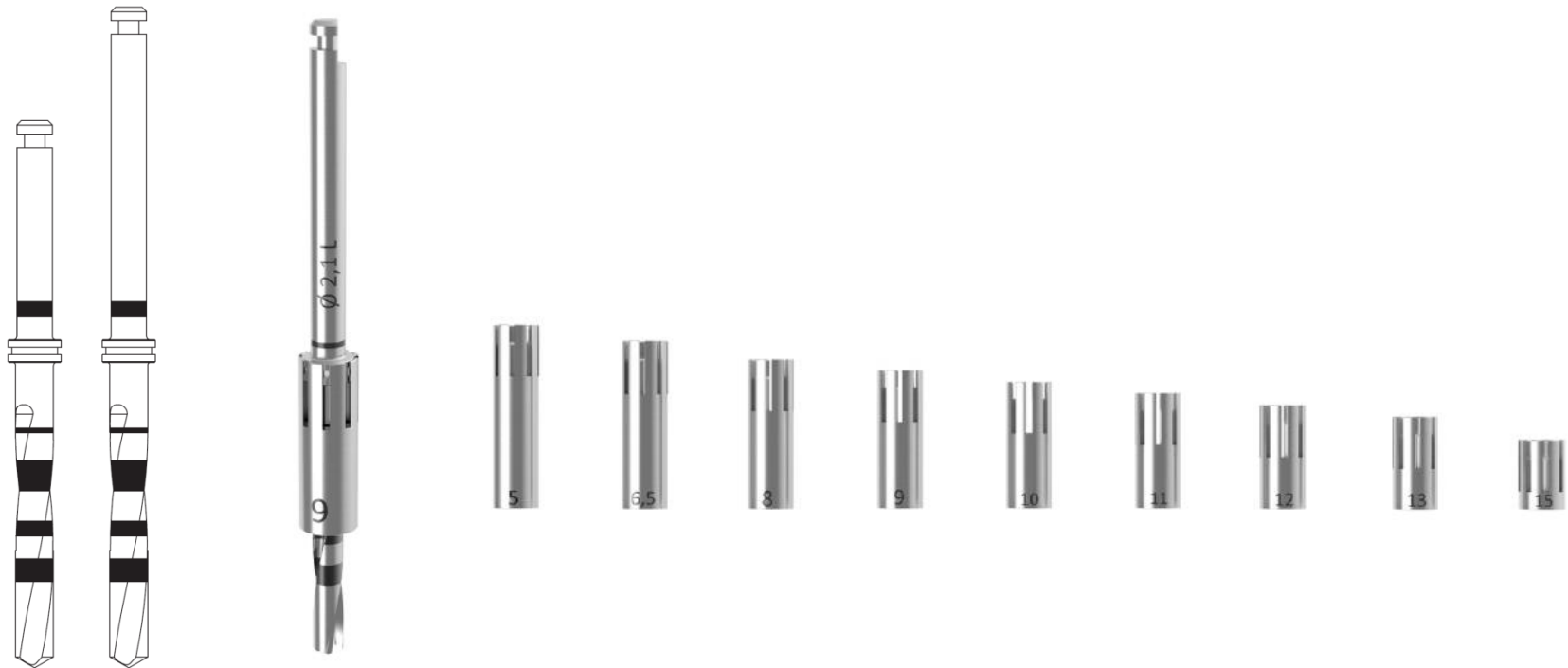


- 1 sada zarážek pro krátké a dlouhé vrtáky
- V určitých situacích mohla být sjednocená zarážka pro krátké a dlouhé vrtáky nevýhodou pro správné chlazení

Nové spirálové vrtáky a zarážky

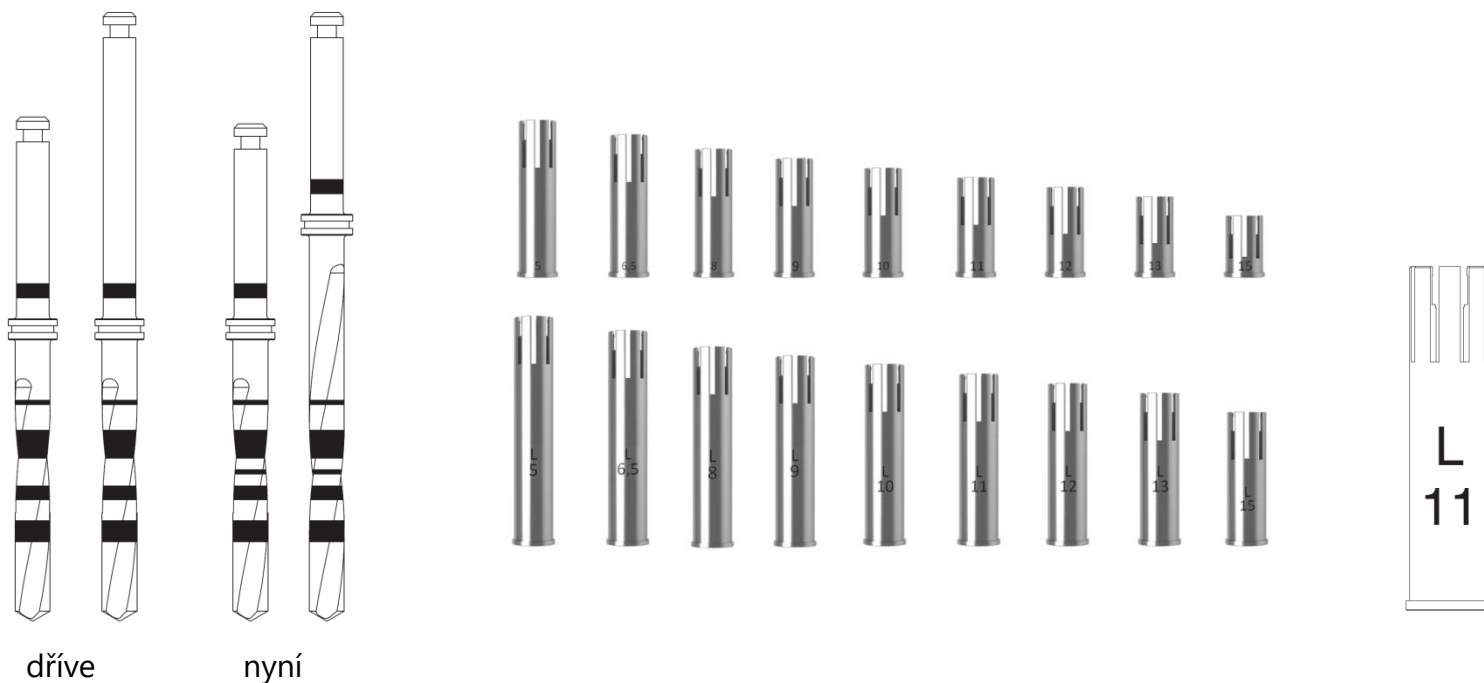

- Nutné k vyřešení problémových situací: **nové vrtáky + nové zarážky**
- K dispozici budou 2 sady zarážek: jedna sada pro krátký vrták a druhá pro dlouhý vrták (označeno písmenem „L“)
- Na zarážky bylo přidáno vnitřní odsazení pro větší retenci a doraz pro zlepšení odstranění
- Byla přidána zarážka pro vrtáky 10 mm

Nové spirálové vrtáky a zarážky

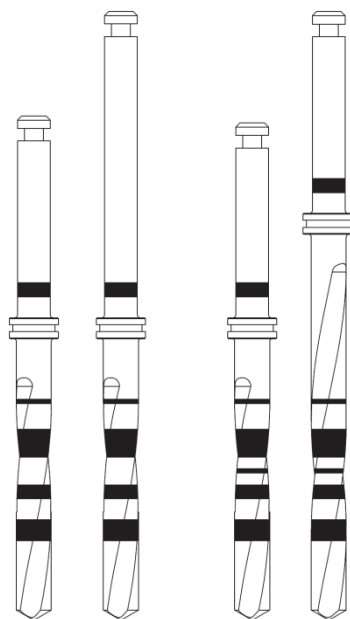


dříve

nyní

- Zákazníci mohou pokračovat a používat současné krátké vrtáky se zarážkami pro krátké vrtáky a nakupovat pouze dlouhé vrtáky s odpovídajícími dlouhými zarážkami



Finální vrtáky

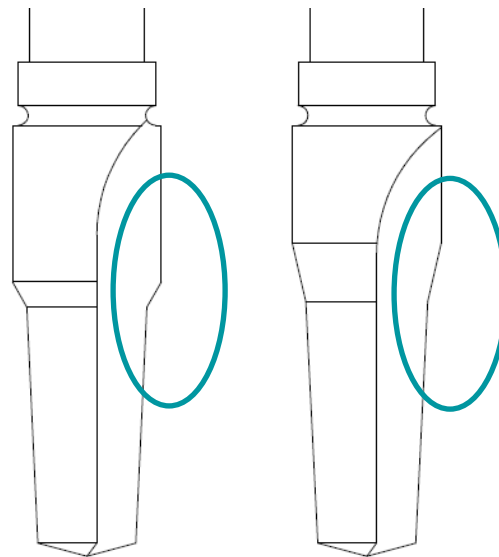


- Pracovní část vrtáku má pozvolnější profil, ke zlepšení vnímání uživatelem
- Stejná funkčnost a použití jako současné finální vrtáky



W-Start a W-Fix zavaděče


pro way Mix a way Extra:

- Jednotný typ spoje: **jedna jediná varianta**,
žádné barevné značení
- **Drážky pro různé hloubky**
- Stejná funkčnost a použití jako současné zavaděče

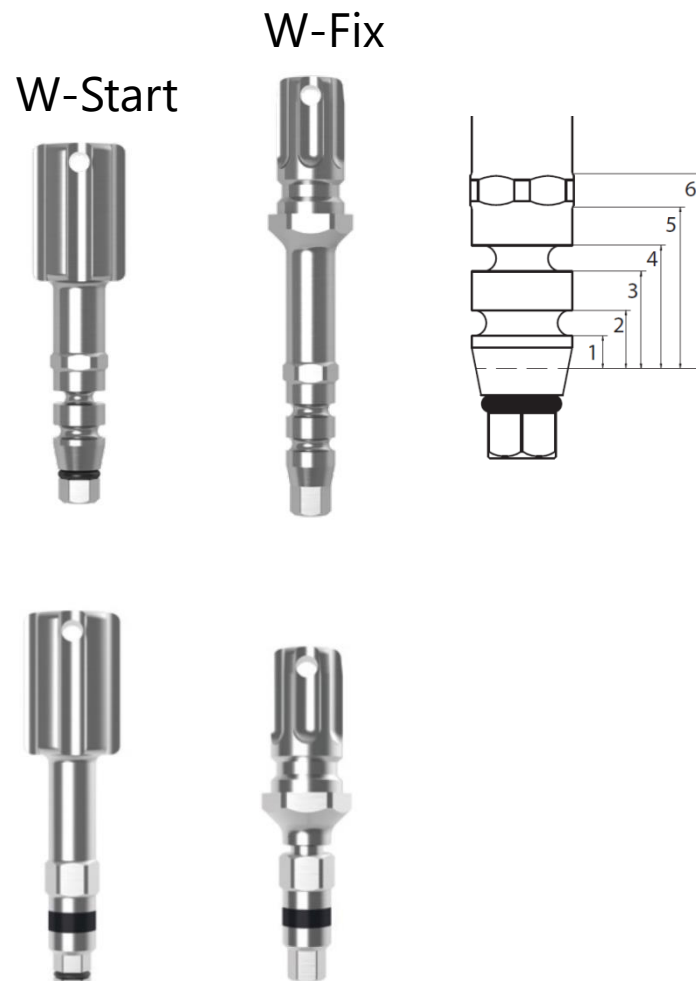


way Slim: pro jejich rozlišení byl přidán černý pruh

Nový pořadač way

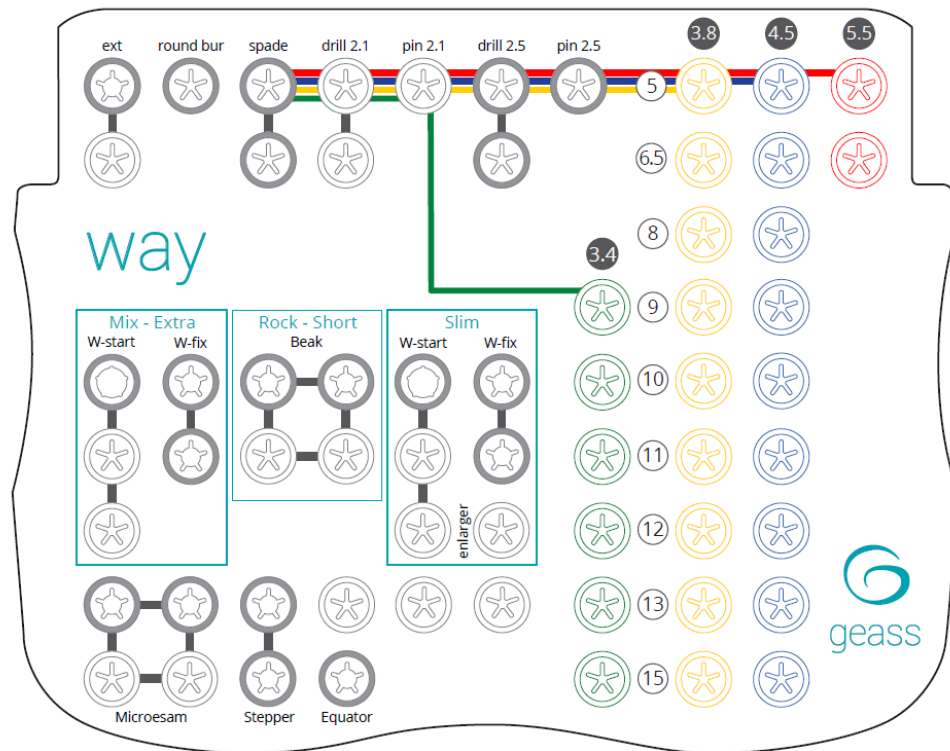

- Nové umístění nástrojů pro zavedení implantátu
- Nástroje, které již nejsou potřeba, byly odstraněny: vrtáky $\varnothing$ 5,5 a Nanoesam

Bone profiler

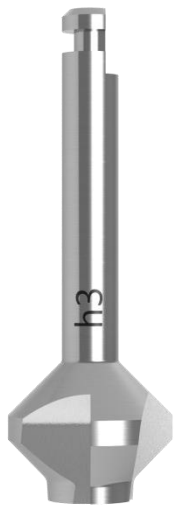

- Slouží k úpravě tvaru alveolu a vytvoření dostatečného prostoru v místě zavedení Mua abutmentu.
- 3 varianty: Mua h1, Mua h3 a Mua Omny Classics
- Maximální rychlost při použití je 200 ot/min.
- V případě, že byl implantát zaveden částečně subkrestálně, buďte šetrní k měkkým tkáním a eventuálně elevujte okolní mukoperiost.



way

catalog & manual

